




Kurzanleitung für Assistina 3x3 / 3x2


Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die Gebrauchsanweisung für die Assistina!
Bei eventuellen Fragen oder Unklarheiten bitte immer die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen.

1. Kartusche einsetzen / entnehmen.

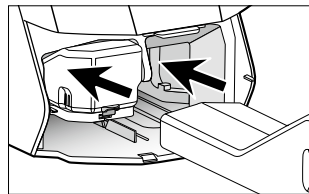

a) Kartusche einsetzen.

- > Kartusche einschieben.
- > Kartusche rastet hörbar ein.

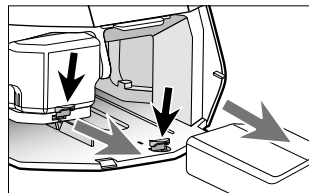

b) Kartusche entnehmen.

- > Taste zum Lösen der Kartusche drücken.
- > Kartusche herausziehen.




Kartuschen müssen beim Einsetzen Raumtemperatur haben.




Der Kartuschendorn ist spitz.
Achten Sie auf die Verletzungsgefahr durch den herausstehenden Dorn!

2. Deckel öffnen.

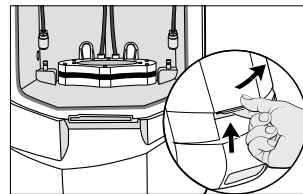


a) Deckel öffnen.

3. Außenreinigungsring einsetzen / entnehmen (Assistina 3x3).

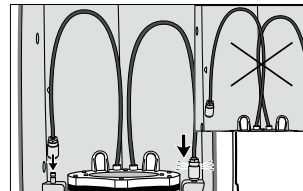

a) Außenreinigungsring einsetzen.


- > Anschlusschläuche parallel auf die Anschlussbuchsen stecken.
- > Anschlusschläuche in die Schlauchführungen klemmen.

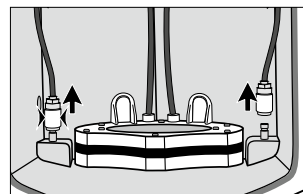

b) Außenreinigungsring entnehmen.

- > Anschlusschläuche von den Anschlussbuchsen abziehen.

4. Erstbefüllung nach Kartuschenwechsel durchführen.

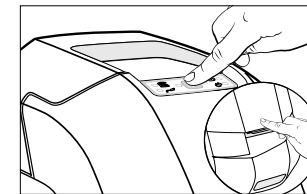

a) Deckel schließen.



Starttaste ca. 5 Sekunden drücken. Die Erstbefüllung benötigt ca. 2 Minuten.




StartLED leuchten grün. Das Gerät ist einsatzbereit.



Bei längerem Stillstand der Assistina (ca. 14 Tage) die Erstbefüllung wiederholen.

5. Allgemeiner Hinweis

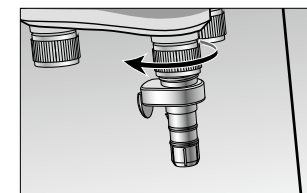

a) Überwurfmutter linksdrehend von Hand gut festziehen (Dichtheit).



Kurzanleitung für Assistina 3x3 / 3x2

Übersicht Fehlermeldungen



- > Stand-by Modus:
Starttaste drücken.
- > Gerät nicht am Stromnetz:
Stromversorgung herstellen.



- > Luftversorgung ausgefallen.
a) Lufthauptversorgung wiederherstellen.
b) Starttaste 1x drücken.
c) Erstbefüllungszyklus durchführen.



- > Entsorgungslade wird während des Aufbereitungsprozesses geöffnet:
a) Entsorgungslade schließen.
b) Starttaste 2x drücken.



- > Elektronik defekt:
An autorisierten W&H Servicepartner einsenden.



- > Pflegeansatz manuell drehen.



- > Deckel wird während des Aufbereitungsprozesses geöffnet:
a) Deckel schließen.
b) Starttaste 2x drücken.



- > Aufbereitungsprozess nicht korrekt beendet:
Starttaste 2x drücken.
- > Starttaste während Aufbereitungsprozess betätigt:
Starttaste 2x drücken.



- > Kartusche
W&H Service Oil F1, MD-200
oder
W&H Activefluid, MC- 1100
leer oder nicht im Gerät:
a) Kartusche tauschen / einsetzen.
b) Starttaste 1x drücken.
c) Erstbefüllungszyklus durchführen.



- > Elektronik defekt.
An autorisierten W&H Servicepartner einsenden.



- > Entsorgungslade voll:
Entsorgungslade entleeren.
Starttaste 1x drücken.
- > Entsorgungslade offen oder nicht im Gerät:
Entsorgungslade schließen oder einsetzen.



- Sensor verschmutzt oder verdeckt
Sensor wischdesinfizieren.
- Schlauch Außenreinigungsring Position prüfen und ggf. einclippen.
- Starttaste 2 x drücken.
Aufbereitungsprozess startet erneut.

