



Kabellos
mit extra kleinem Kopf



entran

Think Endo cordless



Frei und kabellos bewegen

Alles auf einmal zu wollen – absolute Bewegungsfreiheit ohne lästigen Kabelzug, sicheres Behandeln, hervorragende Sicht beim Eingriff dank extra kleinem Kopf – ist jetzt möglich. Mit Entran, dem kabelfreien Handstück von W&H.

Feinfühlinger arbeiten ...

Die Ergonomie eines Handstücks entscheidet mit über den Erfolg der endodontischen Behandlung. Entran überzeugt als kabelfreie Lösung für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung nicht nur mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Auch das besonders geformte Winkelstück mit seinem niedrigen Gewicht zögert das Ermüden der Hand deutlich hinaus.

... mit extra kleinem Kopf ...

Damit Auge und Hand optimal zusammenarbeiten können, ist der Kopf von Entran angenehm klein und kompakt und ermöglicht bestmöglichen Zugang zur Behandlungsstelle.

Dank Easy Click-Funktion lassen sich Gerät und Handstück schnell und einfach zusammenstecken.

Das Handstück kann beliebig gedreht werden – um insgesamt 360° – frei beweglich.

... in allen Anwendungsbereichen

Entran eröffnet Ihnen die ganze Palette endodontischer Eingriffe mit rotierenden Wurzelkanalinstrumenten zur Wurzelkanalaufbereitung. Gleich ob mit der Crown-Down- oder der Single-length-Technik.



Sichere Eingriffe

Erfolgreiche Wurzelkanalbehandlungen erfordern intelligentes Werkzeug. Entran reagiert sofort, wenn die Feile das von Ihnen eingegebene Drehmoment erreicht. Eine automatische Entlastung, die Ihre Eingriffe noch sicherer macht und heute unentbehrlich ist.

Alle Funktionen integriert

Alle Funktionen, die Sie für den sicheren souveränen Eingriff brauchen, sind im Entran-Gerät integriert. Dabei haben wir besonderen Wert auf einfachste Handhabung und höchste Zuverlässigkeit gelegt.

Durch einfachen Tastendruck stellen Sie das Drehmoment ein. Der gewählte Wert erscheint auf der LED. Während des Eingriffs leuchtet bei 75% des eingestellten Drehmoments der Kontroll-LED-Ring. Entran ist W&H- Technologie der neuesten Generation und bietet Ihnen als kleines, kompaktes Cordless-Gerät ein Höchstmaß an Sicherheit.



Auto Reverse

Wird das von Ihnen eingestellte Drehmoment erreicht (1), läuft das Antriebsstück im Linkslauf (2), damit die Feile frei wird. Dann stoppt der Antrieb (3)



Auto Forward

Wenn das eingegebene Drehmoment erreicht wird (1), dreht die Feile auch im Auto-Forward-Modus automatisch in die Gegenrichtung (2), damit die Feile frei wird. Dann läuft sie im Rechtslauf weiter (3).



Stabile Drehzahl

Für die stabile Drehzahl von 300 rpm am Wurzelkanalinstrument sorgt sowohl die präzise arbeitende miniaturisiert Elektronik als auch der in dieser Klasse einzigartige und ausdauernde Li-Ionen-Akku, der jederzeit aufgeladen werden kann – ohne negative Auswirkung auf die Langzeitfähigkeit. Wenn die Akku-Kapazitäts-anzeige blinkt, kann noch ein Patient fertig behandelt werden. Mit einer vollen Akkuladung sind ca. 30 Behandlungen möglich.



Komfortabler behandeln

Entran bietet Ihnen mehr als die Summe seiner einzelnen Features. Nicht nur Bewegungsfreiheit, Sicherheitsfunktionen und einfache Handhabung entscheiden darüber, mit welchem Instrument man lieber arbeitet.

Schneller Feilenwechsel

Die Druckkopfspannung ermöglicht eine einfache und sichere Aufnahme der Feile.

Ergonomisches Winkelstück

Der Winkelstück-Aufsatz wurde nach ergonomischen Anforderungen geformt. Er entlastet beim filigranen Arbeiten die Hand und verzögert ihr Ermüden.

Griffiges Antriebshandstück

Entran liegt perfekt in der Hand. Die graue Soft-Touch-Oberfläche des Antriebshandstücks bietet Ihnen höchsten Komfort und Griffigkeit.

Schlanker Körper

Der schmale Körper und der extrem kleine Kopf vergrößern Ihr Sichtfeld beim Eingriff. Zwei wichtige Details, die ebenfalls den Behandlungserfolg fördern.

Hygiene und Pflege

Der Winkelstück-Aufsatz ist sterilisierbar und thermodesinfizierbar.

Antriebshandstück und Ladestation sind wischdesinfizierbar, lassen sich schnell und einfach reinigen und sind bei der nächsten Behandlung sofort wieder einsatzbereit.

Lieferumfang

- > Antriebshandstück
- > Winkelstück-Aufsatz
- > Ladestation
- > Li-Ionen-Akku, 3,7 V
- > Netzkabel

Zubehör

- > Handstückablage
- > W&H Service Oil F1, MD-400
- > Sprühkopf mit Spray-Adapter für Hand- und Winkelstücke
- > W&H Assistina-Adapter für Winkelstück-Aufsatz

Garantie



- > **24 Monate:** Antriebshandstück, Winkelstück-Aufsatz, Ladestation
- > **12 Monate:** Akku



Technische Daten



Winkelstück-Aufsatz EB-16

Übersetzungsverhältnis	16:1
Kupplungstyp	W&H-Kupplung
Empfohlene Feilen nach EN ISO 1797-1:1995	Feilen zur rotierenden Wurzelauflbereitung für 300 rpm Schaft-Ø (Typ 1) 2,35 mm
Gewicht	35 g
Hygiene  	thermodesinfizierbar / sterilisierbar



Antriebshandstück EB-3 H

Akku-Typ	Li-Ion, 3,7 V
Nennkapazität	680 mAh
Drehzahl	300 rpm an der Feile
Drehmomentstufen	4,0 max. 4.0 Ncm 2,5 max. 2.5 Ncm 1,5 max. 1.5 Ncm 1,0 max. 1.0 Ncm 0,5 max. 0.5 Ncm
Gewicht	85 g
Hygiene	wischdesinfizierbar



Ladestation

Netzspannung	100 - 240 V (± 10%)
Frequenz	50 - 60 Hz
Maße (B x T x H)	95 x 159 x 65 mm
Gewicht	265 g
Hygiene	wischdesinfizierbar



Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten
Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellen Sie Ihr Enträn über Ihren Fachhändler.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 60
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com