

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



Die reinste Erholung für Ihre Instrumente



assistina

Perfekt gepflegte Instrumente leben länger



Vorteile der Assistina plus-Pflege

Durch die automatische Rotationsschmierung wird das Öl optimal verteilt und ein gleichmäßiger Schmierfilm aufgebaut. Schmutzpartikel werden gelöst und entfernt. Die Lebensdauer der Instrumente wird deutlich erhöht, Servicekosten hingegen gesenkt.

Weitere Pluspunkte

Dank automatischer Ölmenge- dosierung wird nur so viel Öl eingebracht, wie für die optimale Schmierung der Instrumente notwendig ist – nicht mehr und nicht weniger.

Perfekt in der Assistina: W&H Service Oil F1

W&H Service Oil F1 ist ein Produkt aus der W&H Forschung und gibt Ihnen die Sicherheit, sämtliche W&H Instrumente optimal zu pflegen.

Pflege auf Knopfdruck mit Reinigungslösung und W&H Service Oil F1

Auf Knopfdruck läuft der Pflegeprozess automatisch ab – Rotationsschmierung, Innenreinigung der Spraykanäle, Durchblasen mit Druckluft. Einfach, komfortabel, sicher. Nach nur 35 Sekunden ist das Instrument perfekt gepflegt.

Assistina 301 plus das luftbetriebene Pflegegerät für

- › Hand- und Winkelstücke
- › Turbinen (außer Luftlagerturbinen)
- › Luftmotoren
- › Luftbetriebene Scaler

Vorzüge der automatisierten Assistina Instrumentenpflege

- › Reinigen und Schmieren der Innenteile mit Service-Öl
- › Reinigen der Spraywasser- und Sprayluftkanäle mit Reinigungslösung
- › Durchblasen mit Druckluft

Sprayversagen durch Kalk- Ablagerungen – das war einmal!

Assistina spült die Spraykanäle mit Reinigungslösung (auf Alkoholbasis) und trocknet sie mit Druckluft.

Eine saubere Sache

Die Assistina macht nicht nur sauber, sie arbeitet auch sauber. Mit Druckluft als Antrieb werden Treibgase, Lösungsmittel und Gebinde überflüssig. Ein Absaugfiltersystem sorgt zusätzlich für saubere Luftabgabe.



01

Instrument aufstecken. Kuppel schließen.



02

Knopf drücken. Pflegeprogramm läuft automatisch.



03

Nach 35 Sekunden durchgeblasenes, perfekt gepflegtes Instrument entnehmen.

Technische Daten

Assistina Adaptersystem



Typ:	Assistina 301 plus
Zykluszeit:	ca. 35 sec.
Füllmenge Service-Öl:	250 ml, für ca. 3.500 Pflegezyklen
Füllmenge Reinigungslösung:	250 ml, für ca. 2.500 Pflegezyklen
Anschluss:	Druckluftanschluss mit Schnellkupplung für Luftschlauch Ø 6 x 4 mm, bauseitig R 1/8" Innengewinde
Druckluft:	4–10 bar Fließdruck (automatische Druckregelung)
Luftverbrauch:	ca. 60 l/min.
Höhe/Breite/Tiefe:	223 x 190 x 415 mm
Gewicht:	2,70 kg

	Direktanschluss	Basis Adapter* für 4 Loch Fixanschluss	Zusatz-Adapter**
Hand- und Winkelstücke:			
Alle mit ISO-Anschluss:	●		
Winkelstücke mit abnehmbaren Köpfen:			●
Sirona T1:			●
Für FG-Spannsystem (W&H, Sirona):			●
NSK-Winkelstücke mit abnehmbaren Köpfen:			●
Turbinen, Luftscaler und Luftmotoren			
W&H mit Roto Quick-Schnellkupplung:		●	●
Übrige mit Schnellkupplung:		●	Schnellkupplung mit 4-Loch-Fixanschluss des jeweiligen Herstellers
Übrige mit 4-Loch-Fixanschluss (mit oder ohne Licht):		●	
Übrige mit Borden 2(3)-Loch-Fixanschluss:		●	●
Sirona TS2 und TM1:		●	●
Adapter für Multiflex****-System:		●	●
NSK mit 4-Loch-Fixanschluss:			●
NSK mit 2(3)-Loch-Fixanschluss:			●

* im Lieferumfang enthalten ** optional *** Multiflex® ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland
 Genaue Angaben zu den verschiedenen Assistina Adaptern finden Sie unter wh.com.
 Bestellen Sie Assistina über Ihren Fachhändler.

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
 Raiffeisenstraße 3b
 83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

20338 ADT Rev. 004 / 31.01.2019
 Änderungen vorbehalten