



Cómo conseguir una higiene y un mantenimiento perfectos



Mantenimiento de instrumentos de transmisión y motores de W&H.

INDICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Estas recomendaciones de higiene y cuidados son sobre todo para instrumentos de transmisión y motores de W&H.

Los instrumentos de transmisión y motores marcados con este símbolo se pueden limpiar y desinfectar térmicamente con un termodesinfectador.

Los instrumentos de transmisión y los motores marcados con este símbolo pueden ser esterilizados por el proceso de esterilización recomendado.

Indicaciones generales

- > Recuerde que los instrumentos de transmisión y los motores deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente después de cada tratamiento.
- > Se recomienda el uso de ropa de protección (guantes, gafas y, en caso necesario, mascarilla).
- > Tenga en cuenta las indicaciones detalladas en las instrucciones de uso del fabricante.
- > Utilizar productos desinfectantes certificados y homologados para los instrumentos de transmisión y motores de W&H, y respetar la dosificación y los tiempos de actuación. El producto desinfectante utilizado no debe contener cloro.
- > Utilice aire limpio y seco.
- > W&H le recomienda utilizar agua desmineralizada.
- > Encontrará información detallada en wh.com

1

PREPARACIÓN

1



Desinfecte frotando en caso necesario

2

LIMPIEZA / SECADO


2

Manualmente

Mecanizado



La limpieza interior se puede realizar con spray autorizado por W&H (consulte wh.com/hygiene)

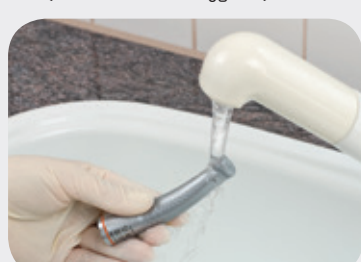

3

DESINFECCIÓN / SECADO

3



Desinfecte frotando

* Para la aplicación de procedimientos manuales siempre es necesario garantizar una limpieza estandarizada y reproducible de eficacia probada.



Siga las instrucciones del fabricante del termodesinfectador.

Inspección visual



4

LUBRICACIÓN

4

Manualmente

Mecanizado



Frecuencia de mantenimiento:
 > Tras cada limpieza interior
 > Antes de cada esterilización
 > Cada de 30 minutos de uso o al menos 2 vez al día



Moteur électrique



5

ESTERILIZACIÓN

5



135°C
55'

Embolsar si es necesario

W&H le recomienda una esterilización con clase B según la norma EN 13060. Compruebe que la carga esté seca tras la termodesinfección/esterilización.

6

ESTERILIZACIÓN CORRECTA DE LA CARGA

6



7

ALMACENAMIENTO

7



Sin polvo, limpio y seco.

Más información en wh.com/hygiene