



W&H RDG Adapterset

Spitzen zur Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

Reinigungsadapter für Ultraschall Scaler Spitzen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik)

- > Alle Scaler Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Innengewinde – von der Spitze aus betrachtet) passen auf den Reinigungsadapter mit der REF 06895000
- > EMS Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Innengewinde) z.B. EMS C (EMS Spitzen mit Schnellspannsystem passen nicht.)
- > NSK Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Innengewinde), kompatibel mit EMS-Handstück
Alle anderen Spitzen von NSK passen nicht
- > Mectron Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Innengewinde) wie z.B. Mectron S7
- > Satelec Spitzen sind nicht kompatibel (Gewindedimension von M3 x 0,6 mm)

Reinigungsadapter für Ultraschall Scaler Spitzen (Chirurgie)

- > Es passen nur die W&H Piezomed Instrumente auf das RDG- Adapter Set
- > Spitzen von z.B. NSK SG3, Satelec CS3, Mectron OT 7 sind aufgrund verschiedenen Gewindedimensionen nicht kompatibel

Reinigungsadapter für Schall Scaler Spitzen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik, Chirurgie)

- > Alle Scaler Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Außengewinde – von der Spitze aus betrachtet) passen auf den Reinigungsadapter mit der REF 06894700
- > KaVo Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. KaVo Spitze 36/10 (KaVo Spitzen mit Schnellspannsystem passen nicht.)
- > NSK Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. NSK S1
- > Brasseler/Komet Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. SF8878KD

Kühlmittelrohre, Sprayclips, Y-Verteilerweichen etc. können ebenfalls gereinigt werden